

Příloha 1b Abecední seznam vyšetření , odběrový materiál, dostupnost (doba dodání, TAT), stabilita

	Název metody	barva uzávěru odběr.soupravy	Dostupnost	Stabilita po separaci			Transport teplota	Speciální požadavky
				15 - 25 °C	4 - 8 °C	- 20 °C		
A	Acidobazická rovnováha		STATIM	30 min	2		transport na ledu	transport na ledu, do 15 min
	S_Albumin	červená	DENNĚ	24	30 dnů	6 měsíců	15 - 25 °C	
	S_Alfa-amyláza	červená	STATIM	7 dní	8 týdnů	30 týdnů	15 - 25 °C	
	U_Alfa-amyláza		DENNĚ	7 dní	10 dní	nemrazit	4 - 8 °C	
	S_ALT	červená	STATIM	72	1 týden	1 měsíc	15 - 25 °C	nutno vyvarovat hemolýze
	S_AST	červená	STATIM	72	1 týden	3 měsíce	15 - 25 °C	nutno vyvarovat hemolýze
B	S_Bilirubin	červená	DENNĚ	24	1 týden	6 měsíců	15 - 25 °C	nutno vyvarovat hemol., uchovávat ve tmě
	S_Bilirubin.konjug.	červená	DENNĚ	24	1 týden	6 měsíců	15 - 25 °C	nutno vyvarovat hemol., uchovávat ve tmě
B	S_Bílkovina celková	červená	DENNĚ	7 dní	4 týdny	1 rok	15 - 25 °C	
	U_Bílkovina celková		DENNĚ	72	1 týden	4 týdny	4 - 8 °C	
C	S_CEA	červená	DENNĚ		1 týden	1 rok	15 - 25 °C	
	S_C-peptid	červená	DENNĚ					
	S_C-reaktivní prot. IT	červená	STATIM	4	1 týden	3 roky	4 - 8 °C	
D	S_Digoxin	červená	DENNĚ	24	1 týden	1 rok	4 - 8 °C	separace séra do 24 hod
	S_Draslík	červená	STATIM	8	2 týdny	1 rok	15 - 25 °C	nutno vyvarovat hemolýze
	U_Draslík		DENNĚ	7 dní	2 týdny	1 rok	4 - 8 °C	
E	S_Etanol	červená	STATIM	7 dní	6 měsíců	1 rok	4 - 8 °C	
F	S_Ferritin	červená	DENNĚ	7 dní	7 dní	1 rok	4 - 8 °C	nutno vyvarovat hemolýze, separace séra
	S_Fosfatáza alkalická	červená	DENNĚ	92	1 týden	2 měsíce	15 - 25 °C	nutno vyvarovat hemolýze
	S_Fosfor anorganický	červená	DENNĚ	24	1 týden	1 rok	4 - 8 °C	separace séra do 3 hod
	U_Fosfor		DENNĚ	48	6 měsíců	6 měsíců	4 - 8 °C	
G	S_Glukóza	červená	STATIM	24	1 týden	1 rok	4 - 8 °C	separace séra po odběru
	B_Glukosa	šedá		24	1 týden	1 rok	4 - 8 °C	v plné krvi bez antiglykolytika pokles hodnot
	P_Glukóza	šedá		24	1 týden	1 rok	4 - 8 °C	K2EDTA + NaF
	U_Glukóza		DENNĚ	2	72	1 týden	4 - 8 °C	
	S_GMT	červená	DENNĚ	5 dnů	7 dní	1 rok	15 - 25 °C	
	B_Glyk.hemoglobin A1c	fialová	DENNĚ	24	10 dní	1 rok	15 - 25 °C	
H	S_HCG	červená	STATIM					
	S_Hořčík	červená	DENNĚ	7 dní	2 týdny	1 rok	15 - 25 °C	nutno vyvarovat hemolýze
	U_Hořčík	moč sběr	DENNĚ	72	5 dní	1 rok	4 - 8 °C	
CH	S_Chloridy	červená	STATIM	7 dní	1 měsíc	1 rok	4 - 8 °C	
	U_Chloridy	moč sběr	DENNĚ	7 dní	1 měsíc	1 rok	4 - 8 °C	
	S_Cholesterol	červená	CHOL	92	1 týden	3 měsíce	4 - 8 °C	

	S_Cholesterol HDL	červená	DENNĚ	48	1 týden	1 rok	4 - 8 °C	
	S_Cholinesteráza	červená	DENNĚ					
I	S_Imunoglobulin -A-	červená	DENNĚ	7 dní	7 dní	3 měsíce	15 - 25 °C	
	S_Imunoglobulin -G-	červená	DENNĚ	7 dní	7 dní	3 měsíce	15 - 25 °C	
	S_Imunoglobulin -M-	červená	DENNĚ	7 dní	7 dní	3 měsíce	15 - 25 °C	
	S_Imunoglobulin -E-	červená	DENNĚ					
K	S_Kreatinin	červená	DENNĚ	24	48	1 měsíc	15 - 25 °C	
	U_Kreatinin	moč sběr	DENNĚ	96	5 dní	6 měsíců	4 - 8 °C	
	S_Kreatinkináza	červená	DENNĚ	48	1 týden	4 týdny	15 - 25 °C	nutno vyvarovat hemolýze
	S_Kreatininkináza-izoenzym MB	červená	DENNĚ	48	1 týden	4 týdny	15 - 25 °C	nutno vyvarovat hemolýze
	S_Kyselina močová	červená	DENNĚ	72	1 týden	6 měsíců	15 - 25 °C	
L	S_Laktátdehydrogenáza	červená	DENNĚ	7 dní	7 dní	1 měsíc	15 - 25 °C	nutno vyvarovat hemolýze
	S_Lipáza	červená	DENNĚ	7 dní	7 dní	1 rok	4 - 8 °C	
M	Moč chemicky	moč ranní	STATIM	2	24		4 - 8 °C	
	Močový sediment	moč ranní	STATIM	2	4		4 - 8 °C	
	S_Myoglobin	červená	DENNĚ	48	1 týden	1 měsíc	4 - 8 °C	separované sérum
N	P_NT-proBNP	fialová	STATIM	6	24	3 měsíce	4 - 8 °C	
P	S_Prealbumin	červená	DENNĚ	48	1 týden	1 měsíc	15 - 25 °C	nutno vyvarovat hemolýze
	S_Prost.spec.antigen	červená	DENNĚ	6	2 týdny	6 měsíců	4 - 8 °C - sérum, p	separace séra do 6 hod
S	S_Sodík	červená	STATIM	24	2 týdny	1 rok	15 - 25 °C	
	U_Sodík	moč sběr	DENNĚ	2 týdny	1 měsíc	1 rok	4 - 8 °C	
T	S_T3 - volný	červená	DENNĚ	24	1 týden	1 rok	4 - 8 °C	
	S_T4 - volný	červená	DENNĚ	24	1 týden		4 - 8 °C	
	S_Transferin IT	červená	DENNĚ	24	7 dní	1 měsíc	15 - 25 °C	nutno vyvarovat hemolýze
	S_Triacylglycerol	červená	DENNĚ	72	1 týden	2 roky	4 - 8 °C	
	S_Teofylin	červená	DENNĚ		1 týden	3 měsíce	4 - 8 °C	
	S_Troponin I	červená	STATIM					
	S_TSH	červená	TSH.	24	5 dnů	1 měsíc	4 - 8 °C	
U	S_Urea	červená	STATIM	24	1 týden	6 měsíců	4 - 8 °C	
V	S_Vápník	červená	DENNĚ	7 dní	3 týdny	1 rok	4 - 8 °C	
	U_Vápník	moč sběr	DENNĚ	24	96	3 týdny	4 - 8 °C	
Ž	S_Železo	červená	DENNĚ	96	3 týdny	1 rok	4 - 8 °C	separace krve do 2 hod
	S_Železo-vazebná kap.	červená	DENNĚ					
	Krevní obraz (KO)	fialová	STATIM					
	P_APTT	modrá	STATIM					

P_Quickův test	modrá	STATIM						
P_Quickův test INR	modrá	STATIM						
P_Fibrinogen	modrá							
P_Antitrombin III	modrá	STATIM						
P_D-dimery	modrá	STATIM						
P_Trombinový čas	modrá	STATIM						